


報告將在30分鐘內送出

Good 良好

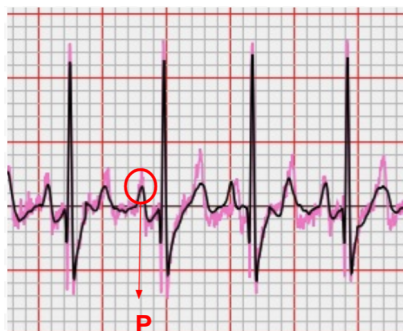

- 清楚的P波
- 清楚的QRS波
- 有一點或影響不大的訊號干擾



- 確認位置正確 (Standard Lead II)
- 清楚的QRS波
- 影響不大的訊號干擾
- 沒有/不清楚的P波 (可能為相關疾病)


Acceptable 可接受




- 還算清楚的P波
- 清楚的QRS波
- 些微的訊號干擾

僅能送出基本報告或無法發出報告

Suboptimal 不理想

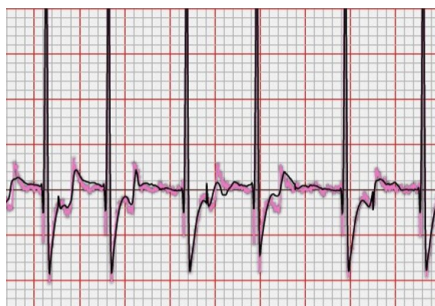

- 無法確認採集位置是否正確 (非 Standard Lead II)
- 有一點或影響不大的訊號干擾
- 不夠清楚的QRS波
- 沒有/不清楚的P波

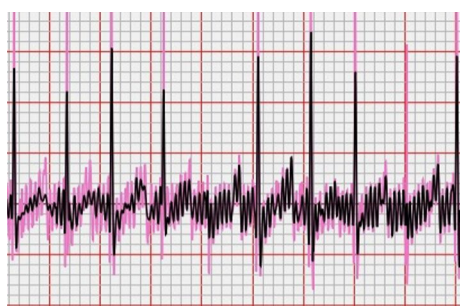


- 訊號過多干擾
- 不夠清楚的QRS波
- 沒有/不清楚的P波

< 建議採取措施 >

- 建議以Standard Lead II重新採集
- 若無法重新採集/5分鐘內無回應，則會在30分鐘內送出只提供基本分析的報告。(Rate, Rhythm, QRS)

Poor 不良

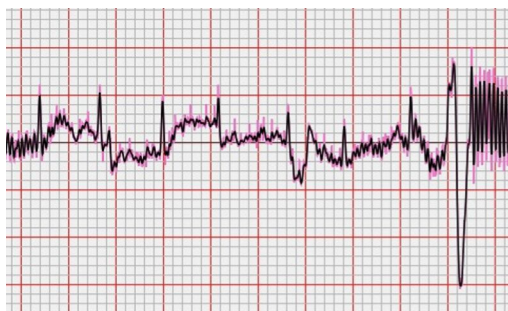

- 過多干擾
- 不夠清楚的QRS波
- 沒有/不清楚的P波
- 單組數據集太短

不會送出報告

< 建議採取措施 >

- 確認網路、藍芽開啟及裝置電量充足
- 判讀結果可能受限，建議以Standard Lead II重新採集
- 若已使用Standard Lead II，則請再次採集

如何減少干擾並採集好數據

1. 使寵物放鬆與穩定
2. 撥開毛髮，並確實以酒精噴濕皮膚與裝置接觸的位置
3. 確認周遭環境的無過多電子或金屬設備